The logo for the Contour Plus ONE Blood Glucose Monitoring System. The word "Contour" is in white, "plus" is in white, and "ONE" is in a large, bold, teal font with a double arrow symbol at the end. Below "ONE" is the text "Blood Glucose Monitoring System" in white.

Contour[®] plus ONE»

Blood Glucose
Monitoring System

如何下載和安裝 CONTOUR™DIABETES app 應用程式




Contour
plus ONE®
Blood Glucose
Monitoring System

1.

下載app應用程式

在您的iphone或ipad
前往App Store

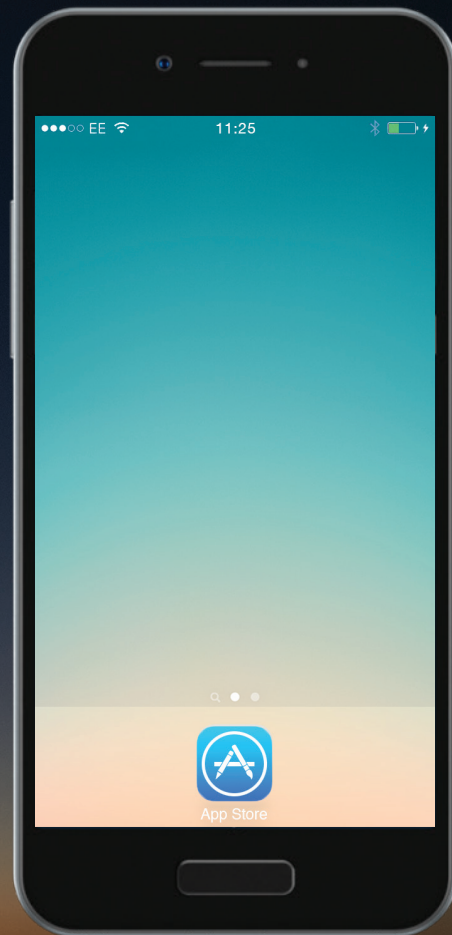


Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

1.

下載app應用程式

開啟App Store

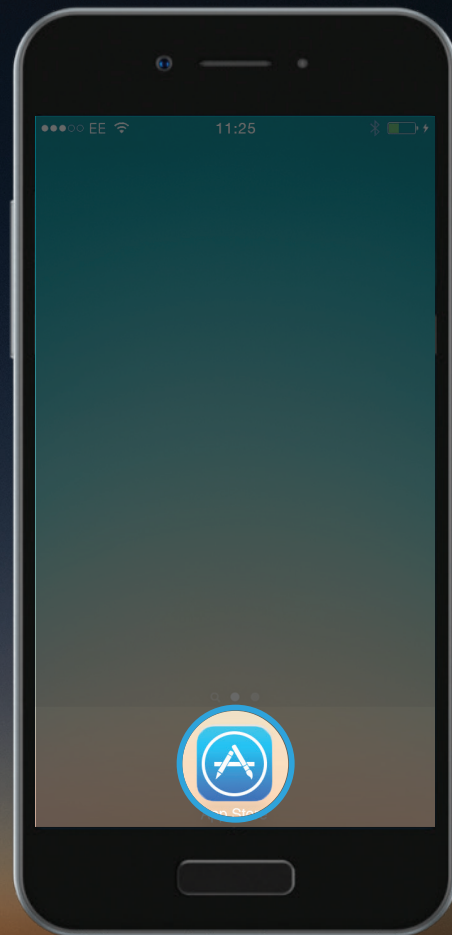

Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

2.

下載app應用程式

搜尋**CONTOUR DIABETES** app
應用程式




Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

2.

下載app應用程式

搜尋**CONTOUR DIABETES** app
應用程式

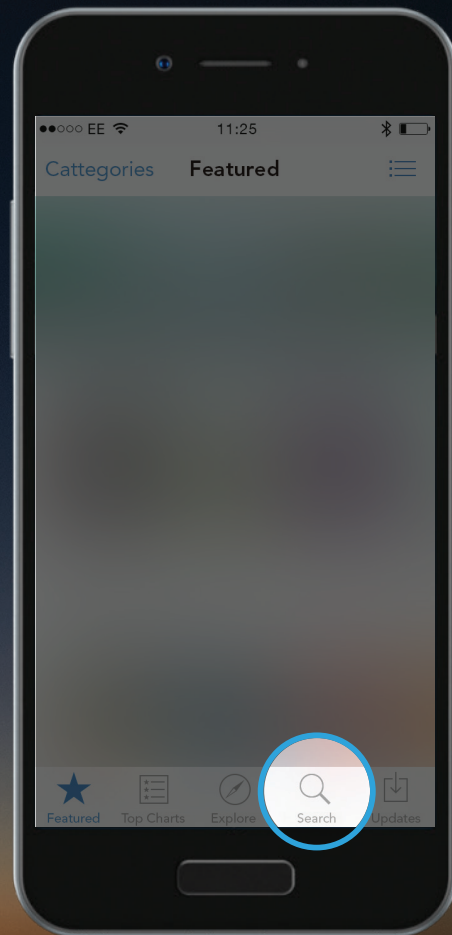


Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

2.

下載app應用程式

在搜索框輸入”Contour Diabetes”

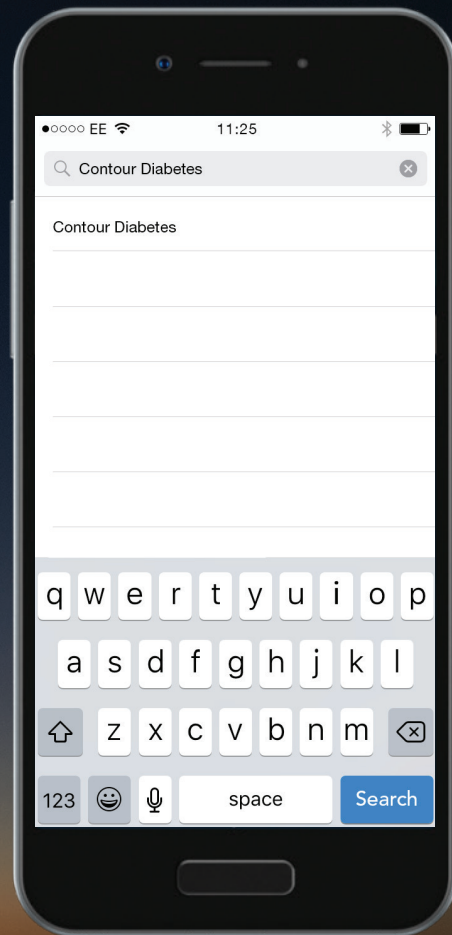


Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

2.

下載app應用程式

選取“搜索”

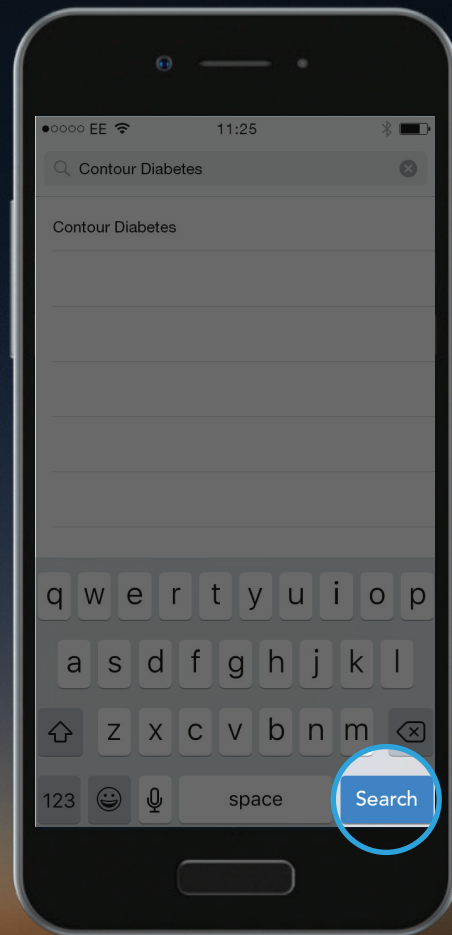


Contour
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

3.

下載app應用程式

選取“取得”，然後選取“安裝”開始下載
CONTOUR DIABETES app應用程式。
提示時輸入您的密碼。

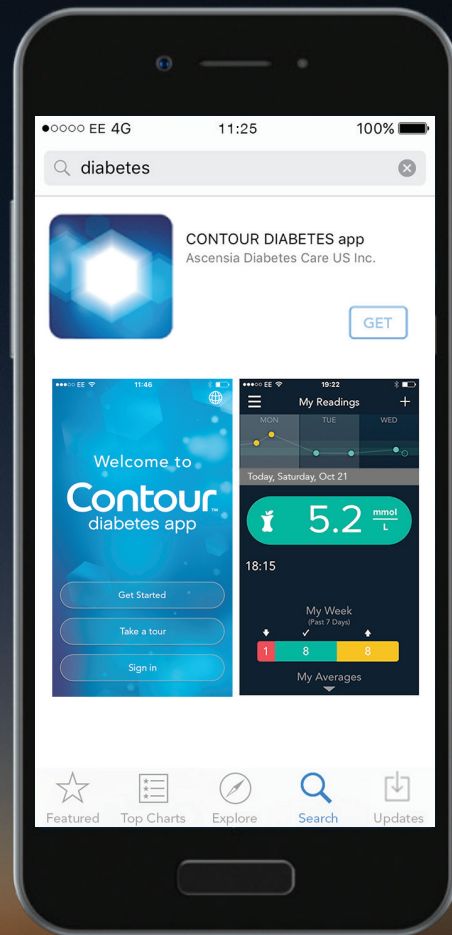

Contour[®]
plus **ONE**[®]
Blood Glucose
Monitoring System

3.

下載app應用程式

選取“取得”，然後選取“安裝”開始下載
CONTOUR DIABETES app應用程式。
提示時輸入您的密碼。




**Contour[®]
plus ONE[™]**
Blood Glucose
Monitoring System

4.

安裝app應用程式

開始安裝**CONTOUR DIABETES** app
應用程式

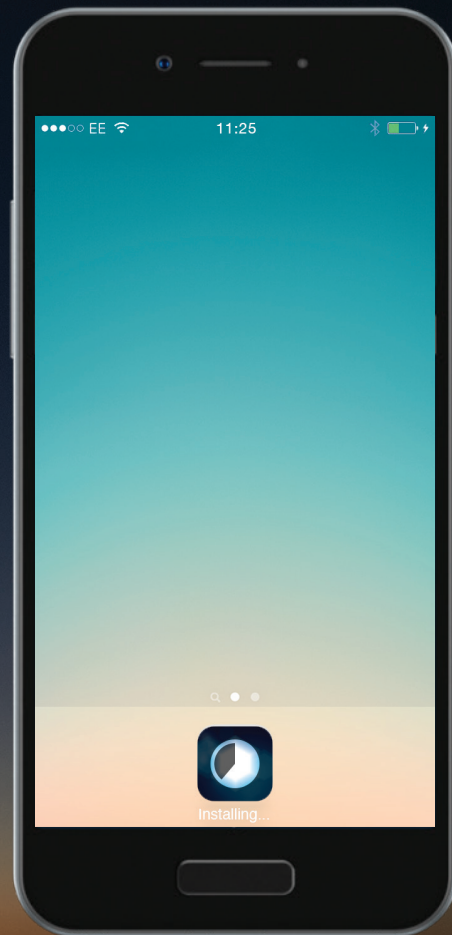


Contour
plus ONE
Blood Glucose
Monitoring System

5.

安裝app應用程式

CONTOUR DIABETES app應用程式安裝完畢。

您現在可設定CONTOUR DIABETES app應用程式。

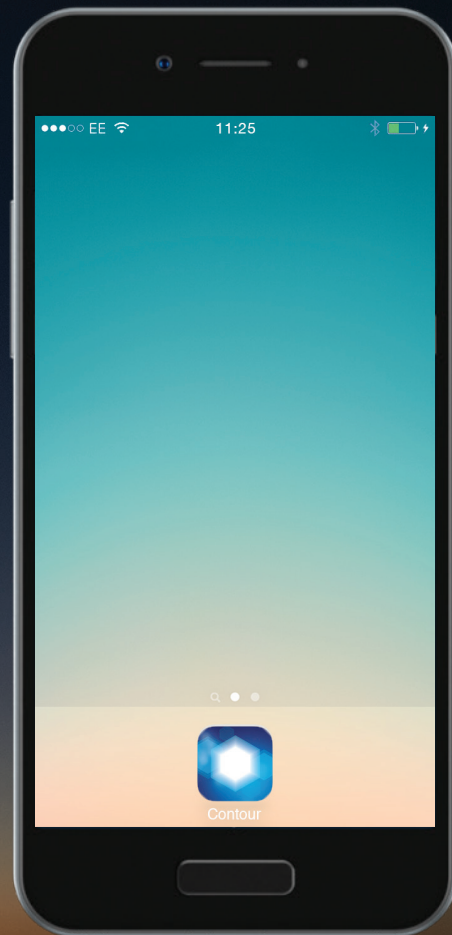


Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

5.

安裝app應用程式

CONTOUR DIABETES app應用程式
安裝完畢。

您現在可設定CONTOUR DIABETES
app應用程式。

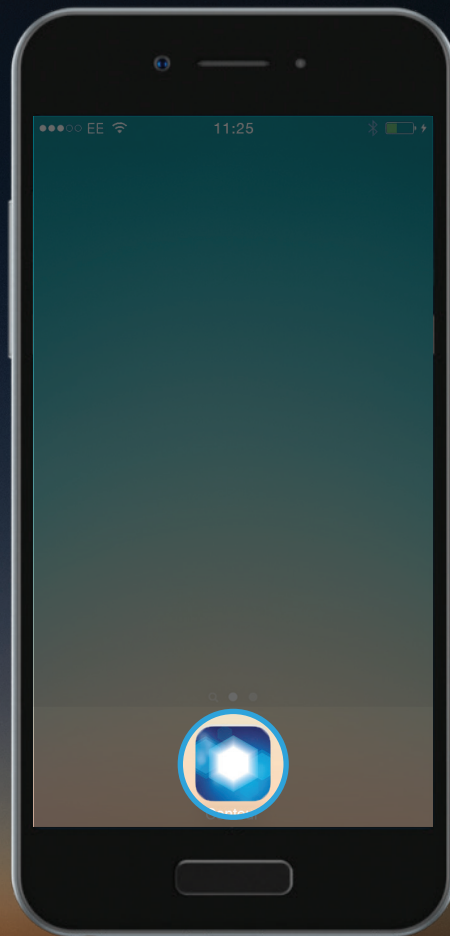

Contour[®]
plus **ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

如果您對**CONTOUR®PLUS ONE**智能血糖儀和**CONTOUR™DIABETES app**應用程式有任何疑問，請諮詢您的醫療保健專業人員，並參閱產品使用指南。

如慾了解更多資訊或查詢您的國家是否有**CONTOUR®PLUS ONE**血糖儀，請瀏覽
www.contourplusone.hk




請變更目標範圍，飲食和運動前先諮詢您的醫療保健專業人員

獲取這個程式



Apple 與 Apple 標誌為蘋果公司 (Apple Inc.) 所屬商標，並已於美國和其他國家註冊。App Store 為蘋果公司 (Apple Inc.) 的服務標記，Bluetooth® 之文字標記和標誌為藍芽技術聯盟 (Bluetooth SIG, Inc.) 擁有的註冊商標。健臻醫療保健 (Ascensia Diabetes Care) 對上述標誌的任何使用均須依據授權規定。Google Play 與 Google Play 標誌為 Google 公司 (Google Inc.) 所得商標。

Ascensia、Ascensia Diabetes Care 標誌以及 Contour 均為健臻 (Ascensia Diabetes Care Holdings AG) 的商標和及/或註冊商標。

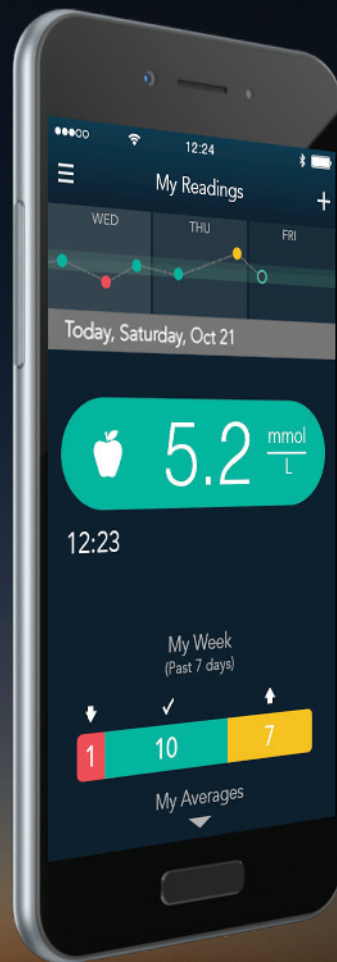

**Contour
plus ONE**
Blood Glucose
Monitoring System

